



DM ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : D-16-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<u>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ</u>	1
<u>ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ</u>	1
<u>ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</u>	2
<u>ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ</u>	2
<u>ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ</u>	2
<u>ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ</u>	2
<u>ΣΚΕΛΕΤΟΣ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ</u>	2
<u>ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΧΡΗΣΗΣ</u>	3
<u>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ</u>	3
<u>ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ</u>	4
<u>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ</u>	4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Κατασκευαστής : ΔΕΜΕΡΤΖΗ Μ. – “DM”

Διεύθυνση : Θεσσαλονίκης 63, Μοσχάτο Τ.Κ. 183 46, Αθήνα

Τηλ. : +30 2105770603

ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

 Κατασκευαστής	 Ημερομηνία κατασκευής	 Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
 European Conformity	 Αριθμός καταλόγου	 Κωδικός παρτίδας





ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ!

– Παρακαλούμε διαβάστε και κατανοήστε πλήρως όλες τις οδηγίες και τις πληροφορίες ασφάλειας που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση και λειτουργία του Προϊόντος.

- Παρακαλούμε πριν την χρήση βεβαιωθείτε ότι το Προϊόν είναι πλήρες, πλήρως συναρμολογημένο σύμφωνα με την περιγραφή του Εργοστασίου. Επίσης εάν μέρη ή εξαρτήματα του Προϊόντος λείπουν ή είναι φθαρμένα υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του προσωπικού, ασθενών ή πρόκλησης άλλης υλικής ζημιάς. Σε αυτή την περίπτωση μην χρησιμοποιήσετε το Προϊόν αλλά επικοινωνήστε άμεσα με τον Πωλητή ή Αντιπρόσωπο του Εργοστασίου.
- Μην υπερφορτώνετε το Προϊόν. Τηρείστε τα όρια αντοχής φόρτωσης (βλ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ).

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τα Προϊόντα που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μοντέλα της σειράς ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ INOX 304 / ΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ – ΛΕΠΤΟ ΣΤΡΩΜΑ.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ

Το εγχειρίδιο καλύπτει την χρήση των Προϊόντων Εξεταστική Κλίνη, την περιποίηση και καθαρισμό των επιφανειών και την απαιτούμενη συντήρηση.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Προϊόν Εξεταστική Κλίνη προορίζεται για την υποβοήθηση της θέσης του σώματος ή των μελών του ασθενούς κατά την εξέτασή του από το αρμόδιο προσωπικό.

Στο κάτω μέρος, η βάση με 4 πέλματα εξασφαλίζει σταθερή έδραση σε χώρο και θέση που επιθυμεί ο χρήστης.

Είναι κατάλληλο για Νοσοκομεία, Χειρουργικά Κέντρα, Κλινικές, Ιατρεία, Εξεταστήρια, και όπου λαμβάνουν χώρα γενικές και ειδικές ιατρικές εφαρμογές.

ΣΚΕΛΕΤΟΣ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ



Το Προϊόν Εξεταστική Κλίνη αποτελείται από τα κάτωθι :

- **Σκελετός κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι – INOX 304**
- **Επιφάνεια κατάκλισης αποτελούμενη από 2 τμήματα (με ίσιο προσκέφαλο και λεπτό στρώμα), με επένδυση δερματίνης**
- **Ανάκλιση πλάτης ρυθμιζόμενου ύψους με ειδικό μηχανισμό**
- **Με μηχανισμό για το ρολό χάρτου (για τις χρήσεις της εξέτασης)**
- **Με 4 πέλματα – πόδια στο κάτω μέρος**

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- **Ποτέ μην υπερφορτώνετε την επιφάνεια της κλίνης**
 - Μην χρησιμοποιείτε την κλίνη για άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη
 - Μην ρίχνετε βαριά αντικείμενα επάνω στην επιφάνεια της κλίνης

Η χρήση του Προϊόντος με ένα από τους ανωτέρω τρόπους μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό σε ανθρώπους (ασθενείς, νοσηλευτικό προσωπικό κλπ), ζημιά ή βλάβη στον σκελετό και στη βάση του (βλέπε κάτωθι), ή ακόμη και ανατροπή - πτώση του Προϊόντος.

Περιοδικά ελέγχτε την κατάσταση του Προϊόντος και παρατηρήστε εάν υπάρχουν σημάδια φθοράς ή βλάβης (βλέπε τελευταία παράγραφο)

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΧΡΗΣΗΣ

Βεβαιωθείτε αρχικά ότι η κλίνη εδράζεται σε σταθερή, επίπεδη θέση επί του δαπέδου. Για την μεταφορά του ασθενούς επί της κλίνης χρησιμοποιείστε τα κατάλληλα βιοθήματα (σκαλοπάτια υποβοήθησης μονό ή διπλό κλπ).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Το Προϊόν πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται σε τακτική βάση σύμφωνα με τις κάτωθι οδηγίες και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκληθεί ζημιά ή φθορά στις επιφάνειες του ανοξείδωτου χάλυβα. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα καθαριστικά υγρά και μέσα καθαρισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τα κάτωθι μέσα, εργαλεία και καθαριστικά υγρά για τον καθαρισμό των ανοξείδωτων υλικών, μερών και επιφανειών του Προϊόντος :

- λειαντικά επιθέματα
 - ξύστρες ή παρόμοια αιχμηρά αντικείμενα
 - συρματόβουρτσες



- μεταλλικές βούρτσες
- νερό υψηλής σκληρότητας
- λευκαντικά ή οποιοδήποτε υγρό περιέχει χλωρίνη
- υδροχλωρικό οξύ
- υγρά Προϊόντα που περιέχουν μετουσιωμένη αλκοόλη (με χημικά πρόσθετα)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για κάθε χημικό υγρό – εμπορικό Προϊόν που προτίθεσθε να χρησιμοποιήσετε για τον καθαρισμό των ανοξείδωτων υλικών και επιφανειών του Προϊόντος συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ : Να χρησιμοποιείτε τα κάτωθι καθαριστικά υγρά και μέσα για τον καθαρισμό :

- καθαρό, μαλακό πανί χωρίς χνούδι
- αποσταγμένο νερό
- αποσταγμένο νερό με ήπιο απορρυπαντικό
- καθαριστικά εγκεκριμένα για ανοξείδωτο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ :

- Χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, μαλακό και χωρίς χνούδι πανί και εγκεκριμένο καθαριστικό υγρό σκουπίστε όλες τις επιφάνειες του Προϊόντος.
- Χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, μαλακό και χωρίς χνούδι πανί να στεγνώσετε τις επιφάνειες του Προϊόντος ή χρησιμοποιήστε στέγνωμα με ξηρό αέρα εάν είναι εφικτό.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Περιοδικά ελέγχετε την κλίνη και την βάση της και παρατηρήστε εάν υπάρχουν σημάδια φθοράς ή βλάβης, ως κάτωθι :

- σπασμένα ή φθαρμένα πέλματα
- χαλαρά σημεία ενώσεων του σκελετού
- αστάθεια ή παραμόρφωση του Προϊόντος (εξαιτίας υπερφόρτωσης ή άλλου λόγου)

Σε αυτή την περίπτωση μην χρησιμοποιήσετε το Προϊόν αλλά επικοινωνήστε άμεσα με τον Πωλητή ή Αντιπρόσωπο του Εργοστασίου.

Το Προϊόν δεν απαιτεί άλλου είδους εργασίες συντήρησης εκτός από τον έλεγχο και τον καθαρισμό που περιγράφηκε ανωτέρω



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι – INOX 304

Εξωτερικές Διαστάσεις : 67X185X70εκ. (πλάτος x μήκος x ύψος)

Αντοχή σε βάρος φόρτωσης : 100 Kg (max συνολικό)